

 BIOCLEAR

ANTERIOR
MATRIX



ПОЧАТОК РОБОТИ

Матриця Bioclear — це єдина на ринку повністю прозора анатомічна секційна матриця. Вона, разом з іншими продуктами Bioclear, дозволяє створити найгладші реставрації та найміцніші контакти у порівнянні з іншими матричними системами. Високоякісні реставрації, створені за допомогою матриць Bioclear, встановлюють нові стандарти для антеріальних композитних реставрацій.

Будь ласка, ретельно прочитайте технічне керівництво та інформацію про догляд за продуктом перед використанням.

ВИБІР МАТРИЦІ





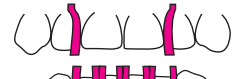





Матриці Bioclear є анатомічними та розроблені під конкретні зуби. Використовуйте цей посібник, щоб полегшити вибір необхідної матриці. Обов'язково переконайтеся, що обрана вами матриця має правильний ступінь гінгівального вигину. Якщо обрана матриця має занадто великий гінгівальний вигин, реставрація не матиме ідеальної фінальної форми.

КЛЮЧІ ДО УСПІХУ



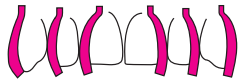





- Оберіть правильну матрицю
- Використовуйте штрипси TruContact для оптимізації контакту
- Перевірте правильність орієнтації матриці
- Підріжте матрицю під висоту папіли
- Встановіть глибоко в сулькус



СТАНДАРТНІ АНТЕРІАЛЬНІ МАТРИЦІ

	A101		верхні мезіальні	Призначені для мезіальної поверхні верхніх різців. Мають прямий оклюзійний край. Закриття невеликих проміжків < 0,5 мм
	A102		верхні дистальні	Призначені для дистальної поверхні верхніх різців. Мають вигнутий оклюзійний край. Закриття невеликих проміжків < 0,5 мм
	A103		малі різцеві універсальні	Призначені для всіх нижніх різців та малих латеральних різців верхньої щелепи. Закриття невеликих проміжків < 0,5 мм
	A104		іклові мезіальні	Призначені для ікол. Мають прямий оклюзійний край. Закриття невеликих проміжків < 0,3 мм
	A105		іклові дистальні	Призначені для ікол. Мають вигнутий оклюзійний край. Закриття невеликих проміжків < 0,5 мм


МАТРИЦІ ДЛЯ ДІАСТЕМИ


	DC201		Верхні мезіальні	Для закриття мезіальної діастеми до 1 мм
	DC202		Верхні дистальні	Для закриття дистальної діастеми до 1 мм
	DC203		Малі різцеві	Для закриття проміжків на нижніх різцях до 1 мм
	DC204		Надвеликі мезіальні для діастеми	Для закриття діастеми у проміжках понад 2 мм

TRUE CONTACT

Використовуйте штрипсу TruContact перед встановленням матриці, щоб полегшити контакт між зубами в місці, де буде розміщена матриця.

- Якщо ви встановлюєте матрицю на поверхню одного зуба, використовуйте **оранжеву** штрипсу.
- Якщо ви встановлюєте дві матриці в один контакт, використовуйте **червону** штрипсу.
- Використовуйте **синю** пилочку після затвердіння композиту, щоб очистити інтерпроксимальну ділянку від небажаних залишків матеріалу та уникнути «хибного контакту».

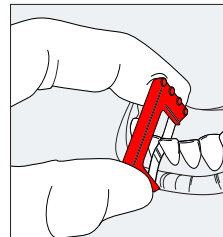

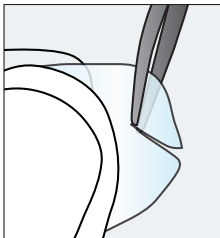

ПІДРІЗАННЯ МАТРИЦІ

У молодих пацієнтів зі здоровою кістковою тканиною необхідно підрізати виїмку на гінгівальному краї матриці. Висота виїмки повинна відповідати висоті папіли. Для підрізання виїмки під папілу використовуйте моделювальні ножиці Bionclear (ID# 500071).

ТАБЛИЦЯ ПІДРІЗАННЯ ПІД ВИСОТУ ПАПІЛИ:


Висока папіла		
Середня папіла		
Низька папіла (чорні трикутники)		

гінгівальна зона
підрізання



ВСТАНОВЛЕННЯ МАТРИЦІ

Затисніть матрицю між великим і вказівним пальцями, щоб занурити її апікально глибоко в сулькус. Якщо матриця не входить на місце, вийміть її та повторно пропрацюйте контактну ділянку штрипсою TruContact.

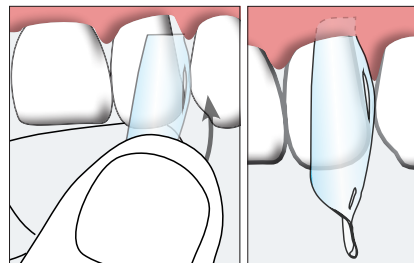

∞ BIOCLEAR



AITAC Плюс
Рівне, Дубенська 11
(067) 360-8228, (050) 435-4290
aitasplus1@gmail.com
Facebook/Instagram: @aitasplus

