



 BIOCLEAR


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Push-Pull


Техніка Push-Pull/Spot-Weld: Застосовуйте, якщо тканин зуба недостатньо, щоб клин і кільце пасивно утримували матрицю впритул до сусіднього зуба. Також можна використовувати для будь-якої реставрації II класу, щоб забезпечити щільні контактні пункти.

Примітка: Полірування (бурнішинг) не працює з майларовими матрицями, тому для створення щільних контактів використовуйте техніку Push-Pull/Spot-Weld.


1.
ВТИРАЙТЕ
АДГЕЗИВ У
КАНАЛЬЦІ

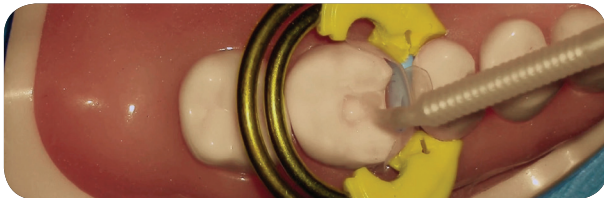


2.
НАНЕСІТЬ
АДГЕЗИВ У
КУТИ

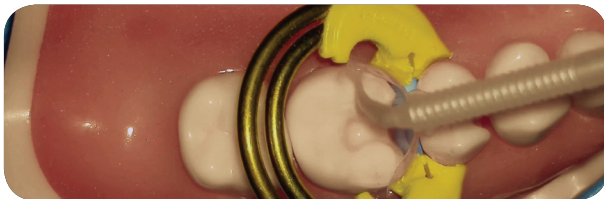

3.
РОЗДУВАННЯ
ПОВІТРЯМ

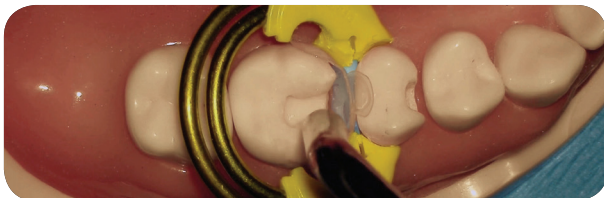


4.
СТВОРІТЬ
«ФІКСАТОРИ»

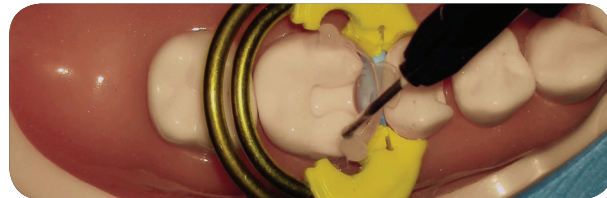

5.
ПРИТИСК/ТЯГА
МАТРИЦІ



6.
ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ
«ФІКСАТОРІВ» ТА
АДГЕЗИВУ

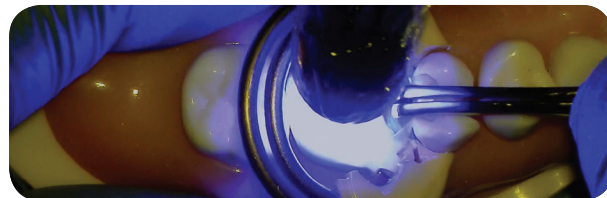

ТЕХНІКА PUSH-PULL/SPOT-WELD

Початкова підготовка: Після препарування порожнини протравіть, промийте та висушіть (як зазвичай).

1. ВТИРАЙТЕ АДГЕЗИВ У ДЕНТИННІ КАНАЛЬЦІ

Втирайте адгезив у дентинні каналці протягом повних 20 секунд.

2. НАНЕСІТЬ АДГЕЗИВ У КУТИ

Краплями нанесіть адгезив біля оклюзійних кутів матриці.

3. РОЗДУВАННЯ ПОВІТРЯМ

Роздувайте повітрям, доки адгезив не перестане рухатися.

ПЕРЕД СВІТЛОВОЮ ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ АДГЕЗИВУ застосуйте техніку Spot Weld з інструментом Push/Pull:

4. СТВОРІТЬ «ТОЧКОВІ ФІКСАТОРИ»

Нанесіть текучий композит на оклюзійні кути матриці, щоб створити «точкові фіксатори» з вестибулярного та язикового боків. Використайте достатньо матеріалу, щоб він покривав матрицю ззовні та зсередини та його вистачило з урахуванням зміщення матриці до сусіднього зуба.

Порада: З вестибулярного та язикового боків має бути по одному «точковому фіксатору», щоб утримати матрицю на місці.

Порада: Переконайтеся, що частина текучого композиту заходить за край матриці та з'єднує матеріал під матрицею (з боку зуба) та ззовні матриці, щоб після полімеризації він утримував матрицю на місці.

5. ПРИТИСНІТЬ/ПОТЯГНІТЬ МАТРИЦЮ

Введіть інструмент Push-Pull у порожнину та потягніть (якщо медіальна) або притисніть (якщо дистальна) матрицю до сусіднього зуба.

6. ОДНОЧАСНО ПОЛІМЕРИЗУЙТЕ «ФІКСАТОРИ» ТА АДГЕЗИВ

Утримуючи матрицю на місці інструментом Push-Pull (із зусиллям 1–1,5кг), полімеризуйте точкові фіксатори з текучого композиту лише з оклюзійного боку по 5 секунд кожен. ЗНІМІТЬ PUSH-PULL, ПОТІМ ПОЛІМЕРИЗУЙТЕ АДГЕЗИВ У ПОРОЖНИНІ ПРОТЯГОМ 10 СЕКУНД. Далі виконуйте реставрацію як зазвичай.

ПРИМІТКА: Полімеризуйте кожен точковий фіксатор окремо.

Порада: 5 секунд для полімеризації «точкових фіксаторів» достатньо, оскільки пізніше ви проведете фінальну полімеризацію всієї реставрації. Доручіть полімеризацію асистенту, щоб ви могли одночасно стабілізувати та притискати інструмент.

ПОЛІМЕРИЗОВАНІ точкові фіксатори утримуватимуть матрицю на місці **НЕ** занурюйте Push-Pull у композит (на відміну від контактних формерів)

ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Інструменти Push-Pull багаторазові та придатні до автоклавування

ОЧИЩЕННЯ

- Ретельно промивайте інструменти після використання, щоб залишки не висихали та не тверділи
- Залишки, що не змілися, видаляйте з інструментів м'якою щіткою та м'яким мийним засобом (наприклад, засобом для миття посуду)

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

- Після очищення стерилізуйте інструменти лише в паровому автоклаві*
- Режим стерилізатора: 270°F/132°C та 30.46psi/210kPa протягом 6 хвилин, час сушіння 20–30 хвилин
- Температура не повинна перевищувати 278.6°F/137°C

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте інструменти в чистому сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів

ІНШІ ЗАУВАЖЕННЯ

- * Хімічну стерилізацію застосовувати не можна. У разі хімічної стерилізації гарантія анулюється
- Інструменти постачаються нестерильними; перед першим використанням їх слід простерилізувати в паровому автоклаві
- Перед кожним використанням оглядайте інструменти. У разі появи іржі, розшарування, іншої зміни кольору або пошкодження припиніть використання такого інструмента
- Не протирайте та не замочуйте інструменти в агресивних хімічних речовинах, таких як ацетон або спирт високої концентрації — це може пошкодити інструменти.

